


acrytemp



BRILLIANT CHARME

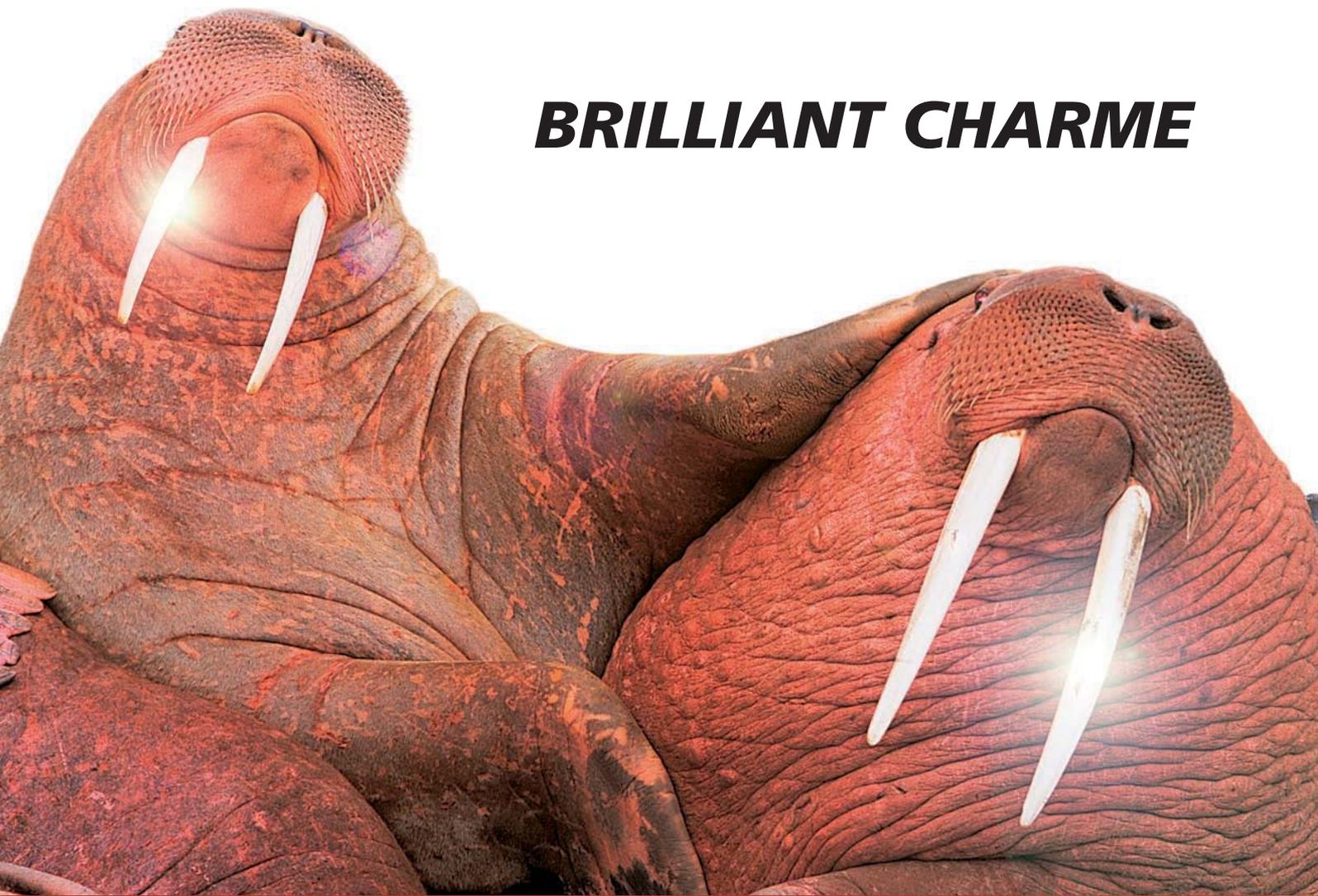

Clinical

Temporary C&B Composite

Zhermack[®]

CLINICAL



acrytemp

¡Brillo natural para una estética sin pun

APLICACIÓN CLÍNICA

ZHERMACK presenta la resina autopolimerizable para la **preparación rápida** de provisionales de prótesis fija **directamente en la consulta.**

VENTAJAS ÚNICAS

- **Protección** del pilar
- Respeto de la **relación dento-parodontal**
- **Mantenimiento** de la posición dental
- Elevada **resistencia a la rotura**
- **Estética natural** del provisional terminado
- **Excelente sellado de los márgenes**
- Creación de **superficies compactas y lisas** que reducen el riesgo de acumulación de placa
- **Baja temperatura de reacción** para evitar irritaciones de la pulpa dentaria



Recolocación de la impresión en el pilar



Acabado del provisional con ACRYTEMP

to de comparación!




Aplicación de ACRYTEMP en la impresión realizada antes de la preparación del pilar



Remoción del provisional de la impresión después del endurecimiento



Provisional terminado

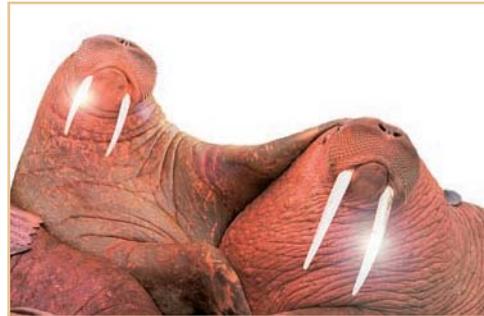

CARACTERÍSTICAS IDEALES

- **Fácil de pulir**
- Las **coloraciones** A1, A2, A3, A 3,5, B1, B3 permiten satisfacer **todas las posibilidades clínicas**
- **Sistema de automezcla** en cartuchos de 50 ml (4:1) para una **dosificación ideal** y un **ahorro de tiempo**
- **Tiempo de trabajo ideal** (1 min)
- **Tiempo de fraguado rápido** (5 min)

acrytemp



GPLCOMMUNICATION.COM



Confecciones

C700201 ACRYTEMP A1	1 cartucho de 50 ml + 15 puntas para mezcla 4:1
C700200 ACRYTEMP A2	1 cartucho de 50 ml + 15 puntas para mezcla 4:1
C700215 ACRYTEMP A3	1 cartucho de 50 ml + 15 puntas para mezcla 4:1
C700205 ACRYTEMP A3,5	1 cartucho de 50 ml + 15 puntas para mezcla 4:1
C700211 ACRYTEMP B1	1 cartucho de 50 ml + 15 puntas para mezcla 4:1
C700210 ACRYTEMP B3	1 cartucho de 50 ml + 15 puntas para mezcla 4:1
C700220 ACRYTEMP kit	1 Acrytemp B3 + 1 Acrytemp A2 + 1 Dispenser D2 (4:1) + 30 puntas para mezcla 4:1

Accesorios

C700230	1 dispensador D2 (4:1)
U100210	1 cremallera para dispensador D2
C700240	45 puntas para mezcla 4:1

Branch
Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

Branch
Zhermapol
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72 - 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
zhermapol@zhermapol.pl
www.zhermack.com

Branch
Zhermack Inc.
151 Industrial Way East Bldg B
Eatontown, NJ 07724
Phone +1 - 732 389 8540
Fax +1 - 732 389 8543
info.usa@zhermack.com
www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack UK and Ireland
21 Balmoral Road
Melton Mowbray - Leics.
LE13 1JN
Tel. +44 - (0)7870 690811
uk@zhermack.com
www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack Russia
5/2 Marshala Vasilevskogo St.
123098 Moscow - Russia
Tel. +7 - 0916 9301191
info.russia@zhermack.com
www.zhermack.com

Zhermack SpA
Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack®
BEYOND INNOVATION